

Promedon

— People + Innovat

Cusa® Clarity



INTEGRA
LIMIT UNCERTAINTY

Codman
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES



CHILE

Campanario 107-A, Las Condes / T: (+56) 22-2401900 / ventas@promedon.com

Razón Social: PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S.A. / Rut: 78.566.250- 4

El sistema aspirador quirúrgico ultrasónico CUSA® Clarity está indicado para su uso en procedimientos quirúrgicos donde la fragmentación, emulsificación y aspiración de tejido blando es deseable.

El sistema CUSA® Clarity es un sistema aspirador quirúrgico ultrasónico que permite que un cirujano elimine tejido de manera eficiente y selectiva. Éste realiza tres funciones:

- **Fragmentación:**

Cuando la punta vibrante de la pieza de mano entra en contacto con el tejido, las células del tejido se rompen o se “fragmentan”.

- **Irrigación:**

Líquido de irrigación de una bolsa de solución salina suministrada por el usuario o solución de Ringer lactato se transfiere a la punta distal de la pieza de mano.

- **Aspiración (succión):**

Extrae o “aspira” líquido de irrigación, tejido fragmentado y otros materiales a través del extremo distal de la punta quirúrgica hasta el recipiente suministrado por el usuario.

Característica de Tissue Select®

La función Tissue Select permite al cirujano mantener una alta fragmentación al mismo tiempo que aumenta la selectividad y el control en el sitio quirúrgico.

Los beneficios de Tissue Select® son:

- Brinda al cirujano un mayor control y precisión al reseca cerca de estructuras críticas.
- Mejora la selectividad de los tejidos mientras mantiene la capacidad de fragmentación. El poder en el sitio es limitado, mientras que la fuerza y la eficacia en la remoción de tejido todavía se proporciona.
- Proporciona la máxima selectividad tisular.
- Brinda al cirujano una respuesta táctil superior.

Pieza de mano y puntas CUSA® Clarity

La pieza de mano CUSA Clarity es un dispositivo quirúrgico ergonómico manual. Alberga un transductor que vibra a una frecuencia ultrasónica, transfiriendo las vibraciones a una punta hueca de titanio. Cuando se aplica al tejido del paciente, la punta vibratoria proporciona el efecto quirúrgico deseado: la fragmentación y eliminación de tejido específico.

Disponible en 36 y 23kHz

Punta CUSA® Clarity 36 kHz



Código Producto	Descripción	Longitud	Dimensión interior	Dimensión exterior
C7412S	36 kHz Standard Tip	45.7 (1.80)	2.0 (0.08)	2.6 (0.10)



Código Producto	Descripción	Longitud	Dimensión interior	Dimensión exterior
C7415S	36 kHz Extended MicroTip Plus	192.7 (7.59)	1.6 (0.06)	2.0 (0.08)




C7417S	36 kHz Extended ShearTip	120.5 (4.74)	1.6 (0.06)	2.3 (0.09)
--------	--------------------------	--------------	------------	------------

Punta CUSA® Clarity 23 kHz



Código Producto	Descripción	Longitud	Dimensión interior	Dimensión exterior
C7401S	23 kHz Standar Tip	78.5 (3.09)	2.0 (0.08)	2.6 (0.10)

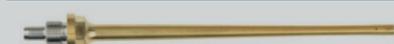

C7418S	23 kHz Tough Tissue Tip	78.7 (3.10)	2.0 (0.08)	2.8 (0.11)
--------	-------------------------	-------------	------------	------------

Promedon
— *People + Innovation*



[promedonchile](#)



[promedonchile](#)



[Promedon Chile](#)